

Bode



**Empfohlene
Reinraumklassen**
ISO 7|8|9
GMP C|D

Bode X-Wipes Tuchrolle (90 Tücher) #980556x

pure¹¹-Nr.: 1106260, Marke: Bode

Eigenschaften

- Marke: Bode
- Flächengewicht in g/m²: 60 g/m²
- Struktur: Vliesstoff
- Material: Vlies
- Lieferform in Verpackung: auf Rolle
- Verpackungsform: auf Rolle
- Anzahl in kleinster Unterverpackung: 90
- Gebrauch: Einweg
- Flächengewicht in g/m²: 60 g/m²

Material

- Vlies

Verpackung

- 6STK

Produktvarianten

pure¹¹-Nr.: 1106260, Bode X-Wipes Tuchrolle (90 Tücher) #980556x

Größe: 30 x 20 cm (12 x 8"); Farbe: Weiß / VE: 6STK



BODE X-Wipes

Universell einsetzbares Vliestuchspendersystem für flüssige HARTMANN Flächen-Desinfektionsmittel.



Anwendungsgebiete

Applikationshilfe für die professionelle Reinigung und Desinfektion. Die BODE X-Wipes eignen sich für alle flüssigen HARTMANN Flächen-Desinfektionsmittel.

Anwendung

Das BODE X-Wipes Spendersystem ist für den Einsatz mit flüssigen HARTMANN Flächen-Desinfektionsmitteln in Konzentrationen mit einer Einwirkzeit von einer Stunde oder kürzer (gem. VAH) geeignet.

Produkteigenschaften

- Schützt Anwendungslösungen vor Kontamination und Verdunsten
- Reißfestes Vlies
- Farbiges Entnahmesystem zur besseren Produktunterscheidung

Der BODE X-Wipes Spender wird mit 2 Liter Anwendungslösung oder 1,2 Liter bei der 40er Rolle des verwendeten HARTMANN Flächen-Desinfektionsmittels befüllt. Beim Einsatz der 40er Rolle in der BODE X-Wipes Dose wird diese mit 800ml Anwendungslösung befüllt. Bei der Herstellung der Anwendungslösungen sind die anwendungs- und sicherheitstechnischen Hinweise des jeweiligen Produktes und Einsatzkonzentrationen zu beachten.

X-Wipes Vliestücher

Je nach Bedarf sind Vliestücher mit einem Umfang von 90 oder 40 Einzeltüchern erhältlich.
Saugfähiges Polyestervlies (60 g/m^2). Auch als BODE X-Wipes basic Vliestücher verfügbar, die mit 40 g/m^2 eine leichtere Vliesqualität bietet (90 Einzeltücher).

Dosierung

Entsprechend der eingesetzten Vliestücher wird der BODE X-Wipes Spender mit 2 Liter Anwendungslösung (90er Rolle) oder 1,2 Liter (40er Rolle) befüllt. Beim Einsatz der 40er Rolle in der BODE X-Wipes Dose wird diese mit 800ml Anwendungslösung befüllt.



Kompatibilität

Das BODE X-Wipes Spendersystem kann mit folgenden HARTMANN-Desinfektionsmitteln benutzt werden:

- Mikrobac® forte
- Kohrsolin® FF
- Bacillol® AF
- Bacillol® 30 Sensitive Foam

Standzeit

Bei ordnungsgemäßem Verschluss verfügen die in BODE X-Wipes eingesetzten Flächen-Desinfektionsmittel von HARTMANN über eine Standzeit von 28 Tagen.

BODE X-Wipes

Zwei Möglichkeiten der Befüllung

Befüllung des BODE X-Wipes Tuchspenders mit der BODE X-Wipes Vliesrolle im Folienbeutel



Befüllung des BODE X-Wipes Tuchspenders mit der Standard BODE X-Wipes Vliesrolle



Fachberatung

HARTMANN SCIENCE CENTER

Tel: +49 (0) 40 - 54 00 6-111

E-Mail: science-center@hartmann.info



**Wir forschen für
den Infektionsschutz**
hartmann-science-center.com

| Produktnamen | Packungsinhalt | Artikelnummer | PZN | Versand-Einh. Packungen |
|--|----------------|---------------|-----|----------------------------|
| BODE X-Wipes Spender für Vliesrolle im Folienbeutel, für 40er und 90er Vliesrolle | | | | |
| 1 Spender Deckelverschluss blau | 981 370 | 10273940 | 4 | |
| 1 Spender Deckelverschluss grün | 981 372 | 10273963 | 4 | |
| 1 Spender Deckelverschluss rot | 981 371 | 10273957 | 4 | |
| BODE X-Wipes Vliesrolle 90 Tücher im Folienbeutel inkl. Deckelsystem | | | | |
| 90 Tücher Größe 200 x 300 mm | 981 946 | 19175914 | 8 | |
| BODE X-Wipes Vliesrolle | | | | |
| 90 Tücher Größe 200 x 300 mm | 980 556 | 3538510 | 6 | |
| 40 Tücher Größe 200 x 300 mm | 980 557 | 3538473 | 12 | |
| BODE X-Wipes basic | | | | |
| 90 Tücher Größe 200 x 300 mm | 980 524 | 3538527 | 6 | |
| BODE X-Wipes Dose für 40er Vliesrolle | | | | |
| 1 Stück | 980 610 | 3539337 | 6 | |
| BODE X-Wipes Wandhalter | | | | |
| 1 Stück | 980 583 | 3539219 | 1 | |
| BODE X-Wipes Sicherungsbügel | | | | |
| 1 Stück | 980 584 | 3539225 | 1 | |

Die Empfehlungen zu unseren Präparaten beruhen auf wissenschaftlichen Prüfungen und werden nach bestem Wissen gegeben. Weitergehende Empfehlungen, z. B. im Hinblick auf Materialverträglichkeit, sind nur im Einzelfall gesondert möglich. Unsere Empfehlungen sind unverbindlich und keine Zusicherung. Sie schließen die eigene Prüfung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke nicht aus. Insoweit können wir keine Haftung übernehmen. Diese richtet sich nach unseren allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Flächen-Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Hilft. Pflegt. Schützt.

PAUL HARTMANN AG
Paul-Hartmann-Straße 12
89522 Heidenheim
Deutschland

Tel. +49 (0) 7321-36-0
Fax +49 (0) 7321-36-36
info@hartmann.info
www.hartmann.info